

CA-MI

À partir de janvier 2018, la gamme HOSPIVAC va s'enrichir.
CA-MI présente la nouvelle rampe à usages multiples :

RAMPE À USAGES MULTIPLES




Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY



Rampe à usages multiples : les composants

CA-MI introduit dans chaque configuration Hospivac la nouvelle Rampe à usages multiples, augmentant ainsi les possibilités d'utilisation de la gamme Hospivac, ce qui permet de changer facilement et rapidement les différents accessoires à la main, sans outils.

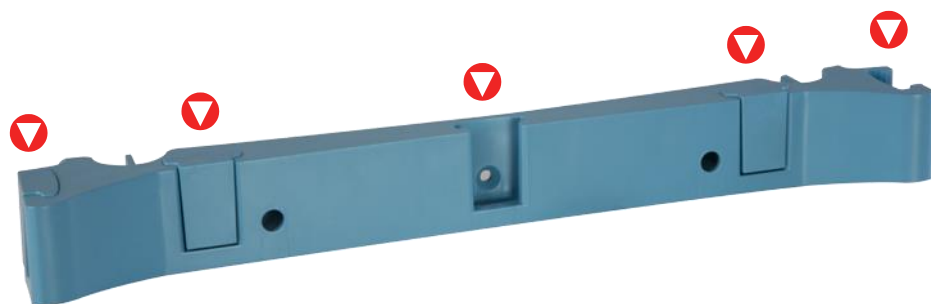

1 RAMPE A USAGES MULTIPLES

Munie de cinq raccordements pour fixer facilement les accessoires CA-MI, tels que des bagues de différents diamètres pour placer des bocal de différents types et tailles, des bouteilles de sécurité, des supports pour canules ou une rampe standard 30x10 en acier inoxydable pour accrocher tout autre accessoire avec une pince standard.



2 OBTURATEUR pour fermer la rampe lorsque aucun accessoire n'est utilisé.

Réf n°



3 BAGUE disponible en trois tailles pour fixer tout bocal CA-MI. Grâce au système de fixation pratique, chaque bague peut être simplement remplacée en la soulevant de son emplacement et en insérant une nouvelle bague.

Réf n°



4 BOUTEILLE DE SÉCURITÉ avec une capacité de 300 ml pour recueillir les liquides qui pourraient couler par la valve antidébordement dans le bocal, offrant ainsi une deuxième protection pour le filtre et la pompe. Entièrement démontable et autoclavable.

Réf n°

5 RAMPE STANDARD EN ACIER INOXYDABLE

reproduit la rampe murale de l'hôpital pour les utilisateurs qui doivent accrocher des accessoires en utilisant des pinces standards. Disponible en dimension 25x10 ou 30x10 mm.



Réf n°

Rampe à usages multiples : comment l'utiliser

3 BAGUES

Chaque Hospivac est fourni avec 2 bagues pour fixer les bocal commandés par le client. Lorsque vous devez utiliser un bocal avec une capacité et un diamètre différent, la bague présente peut être facilement remplacée par la bague adaptée. La rampe possède cinq raccords et peut contenir jusqu'à cinq bocal.

Les bagues sont disponibles en trois diamètres différents pour des bocal CA-MI suivants :

- Bocal autoclavables de 2 000 ml
- Systèmes à usage unique Flovac® de 2 000 ml et 3 000 ml
- Bocal autoclavables de 5 000 ml

2 OBTURATEURS

Lorsqu'aucune bague ni bouteille de sécurité n'est utilisée, chaque raccordement est fermé avec l'obturateur correspondant pour protéger le dispositif contre les impuretés et pour maintenir des conditions d'hygiène élevées.

4 BOUTEILLES DE SÉCURITÉ

Les deux raccords situés sur les côtés sont utilisés pour fixer une bouteille de sécurité pour les configurations BASIC et FS, et deux pour la configuration FULL de l'Hospivac. La bouteille constitue une protection supplémentaire en plus de la valve antidébordement présente dans chaque bocal. Lorsque des gouttes de liquide traversent la valve antidébordement lors de l'aspiration, la bouteille de sécurité retient le liquide, ce qui protège d'abord le filtre, puis la pompe.



Rampe à usages multiples : la polyvalence

Lorsque les utilisateurs possèdent déjà leurs propres bords ou accessoires, CA-MI fournit la solution pour ne pas gaspiller les accessoires déjà existants, grâce à une rampe médicale standard.



Pour les utilisateurs souhaitant utiliser d'autres types de bords ou accessoires, une rampe standard en acier inoxydable peut être commandée séparément pour s'adapter facilement à la Rampe Polyvalente fournie, au lieu des bagues. Grâce à ce système, les utilisateurs peuvent accrocher leurs propres pinces et accessoires, exactement comme sur la rampe murale de l'hôpital. La rampe est disponible en dimension 25x10 ou 30x10.



Des pinces standards peuvent être utilisées pour l'accrocher à la rampe.



Des bagues pour placer d'autres bords, ou d'autres accessoires, peuvent être placées dans la pince accrochée à la rampe.

CA-MI srl

Via Ugo La Malfa 13 - Frazione Pilastro - 43013 Langhirano (PR) - Italie | Tél. +39 0521 637133 - 631138 | FAX +39 0521 639041 | export@ca-mi.it | www.ca-mi.it


MADE IN ITALY